

Návod k použití k produktu WRES01A – Respirátor KN95



Postupujte podle obrázků na krabičce nebo a přiloženém návodu k balení filtrační polomasky.

- 1) Uchopte masku do ruky a přes nosní sponu přehod' dopředu upínací pásky a masku přilož na nos a ústa,
- 2) přetáhněte upínací pásky přes hlavu – nejdříve spodní na krk
- 3) a poté horní na týl hlavy,
- 4) opatrně vytvarujte nosní sponu tak, aby přilehla těsně k nosu a přizpůsob masku tak, abys dosáhl dobrého posazení těsnící linie na tváři,
- 5) otestuj těsnost vydechnutím vzduchu skrz masku. Jestliže vzduch prochází kolem nosní spony nebo jinudy, musí být tato netěsnost odstraněna ještě před vstupem do zamořené oblasti.

Respirátory značené KN95 jsou respirátory stejné třídy jako FFP2. Celková účinnost filtrace: $\geq 95\%$

Tento výrobek neposkytuje ochranu proti plynům nebo při nedostatku kyslíku v ovzduší! Užívat respirátor lze pouze v dobře větraných prostorách s dostatečným obsahem kyslíku v ovzduší (>19 obj. %). Respirátor nelze použít v případě kdy koncentrace nebezpečných nebo toxických látek je neznámá nebo životu nebezpečná. Respirátor musí být vyměněn, jestliže je poškozen, zdeformován nebo dýchací odpor překročí pohodovou úroveň. Opusťte pracovní oblast ihned, jestliže se u vás vyskytnou nějaké potíže v dýchání, závrať nebo zpozorujete jiné významné nepohodlí. Respirátor uchovávejte na suchém a chladném (ne mrazivém) místě. Použitý respirátor likvidujte v souladu s místními předpisy. Použití respirátoru ve výbušném prostředí není dovoleno. Vousy nebo vlasy zasahující do těsnící linie respirátoru mohou mít významný vliv na netěsnost respirátoru.

Výrobce: Solight Holding s.r.o., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové